

Kurzanleitung JOYSBIO-Antigen-Schnelltest für vorderen Nasenabstrich

Bitte unbedingt die vollständige Gebrauchsanleitung beachten!

Vorbereitung

Den Aluminiumfolienbeutel aufreißen. Die Reagenzienkarte herausnehmen und auf eine saubere flache Oberfläche legen

Probenentnahme - vorderer Nasenabstrich

- Den Tupfer etwa 2,5 cm tief in ein Nasenloch einführen und fünfmal drehen.
- Den Vorgang mit demselben Tupfer für das andere Nasenloch wiederholen.

Es muss sichergestellt werden, dass genügend Proben aus beiden Nasenhöhlen entnommen wird!



Testdurchführung

- Den Verschluss von der Pufferflasche (Ampulle) abdrehen
- Die gesamte Pufferlösung in das Extraktionsreagenzglas („Extraction tube“) geben
- Den Tupfer bis zum Boden des Extraktionsröhrchens einführen
- Den Tupfer etwa 20 Sekunden lang drehen
- Den Tupfer entfernen, gleichzeitig beide Seiten des Reagenzglases zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Wattestäbchen zu extrahieren
- Die Kappe schließen: die Düsenkappe fest auf das Extraktionsröhrchen drücken (kein Einfädeln oder Verdrehen erforderlich)
- Das Röhrchen drehen oder an den Boden schnippen, dadurch die Lösung gründlich mischen
- Bitte drücken Sie das Extraktionsröhrchen leicht und lassen Sie drei Tropfen der verarbeiteten Probenlösung in das Probenloch der Testkarte fallen

Testauswertung

Nach 15 bis 20 Minuten liegt das Ergebnis vor (nach 20 Minuten ist das Ergebnis ungültig).

